

Meldingsformulier voor verzending van een pomp

Van

Naam instituut: _____

Adres: _____

Contactpersoon: _____

Telefoonnummer: _____ Mailadres: _____

Datum Naar

___ / ___ / _____ Nutricia Pump Service Centre, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel.
Verzend de pomp steeds met een volledig ingevuld formulier.

Flocare Infinity serienummer

Flocare Infinity SN

Reden voor verzending

- Pomp is niet langer nodig Gelieve de pomp **gereinigd en ontsmet** in de originele verpakking te verzenden, **zonder klem en zonder adapter**, tenzij ze stuk zijn of tenzij de pomp niet langer nodig is. Indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is, moet de pomp verpakt worden zodat ze bestand is tegen schokken tijdens het vervoer.
- Controle en/of herstelling Indien bekend is dat de pomp besmet is met MRSA-virus of een ander vergelijkbaar risico, wordt de pomp niet aan Nutricia aangeboden.

Probleemvermelding (bij controle en/of herstelling)

Gelieve met een kruisje aan te duiden wat er aan de hand is (NOK).

flocare [®] Infinity [™]	NOK	NOK
Externe controle		
Behuizing beschadigd		
Toetsenbord defect		
Deur, -scharnieren of klepje op de pomp beschadigd		
Rotor beschadigd		
Aansluitpunt voor de adapter stuk		
Schroef voor de paalklem defect		
Batterij / adapter / stroom		
Pomp kan niet aangezet worden		
Pomp werkt alleen op stroom		
Pomp laadt niet op		
Batterijcapaciteit lager dan verwacht		
Batterijsymbool E en F knipperen		
Allerlei		
De pomp is gevallen		
Er is vloeistof in de pomp gelopen		
2-jaarlijkse controle nodig (zie sticker 'Next service check')		
		Pomp maakt lawaai : 'schuurt' of rammelt
		Fill set werkt niet
		Alarmen
		Geen AIR alarm
		Geen OCC OUT alarm
		Geen OCC IN alarm
		Geen DOOR alarm
		Geen NO SET alarm
		Constant AIR alarm
		Constant OCC OUT alarm
		Constant OCC IN alarm
		Constant DOOR alarm
		Constant NO SET alarm
		ERROR, vermeld welke
		Precisie
		Toegediend volume incorrect <input type="checkbox"/> te laag <input type="checkbox"/> te hoog
		Toegediend volume fluctueert

Opmerking / toelichting: _____